


СОГЛАСОВАНО
Председатель ППО МАДОУ
«Детский сад №16»
Вахитова / Г.Г.Вахитова

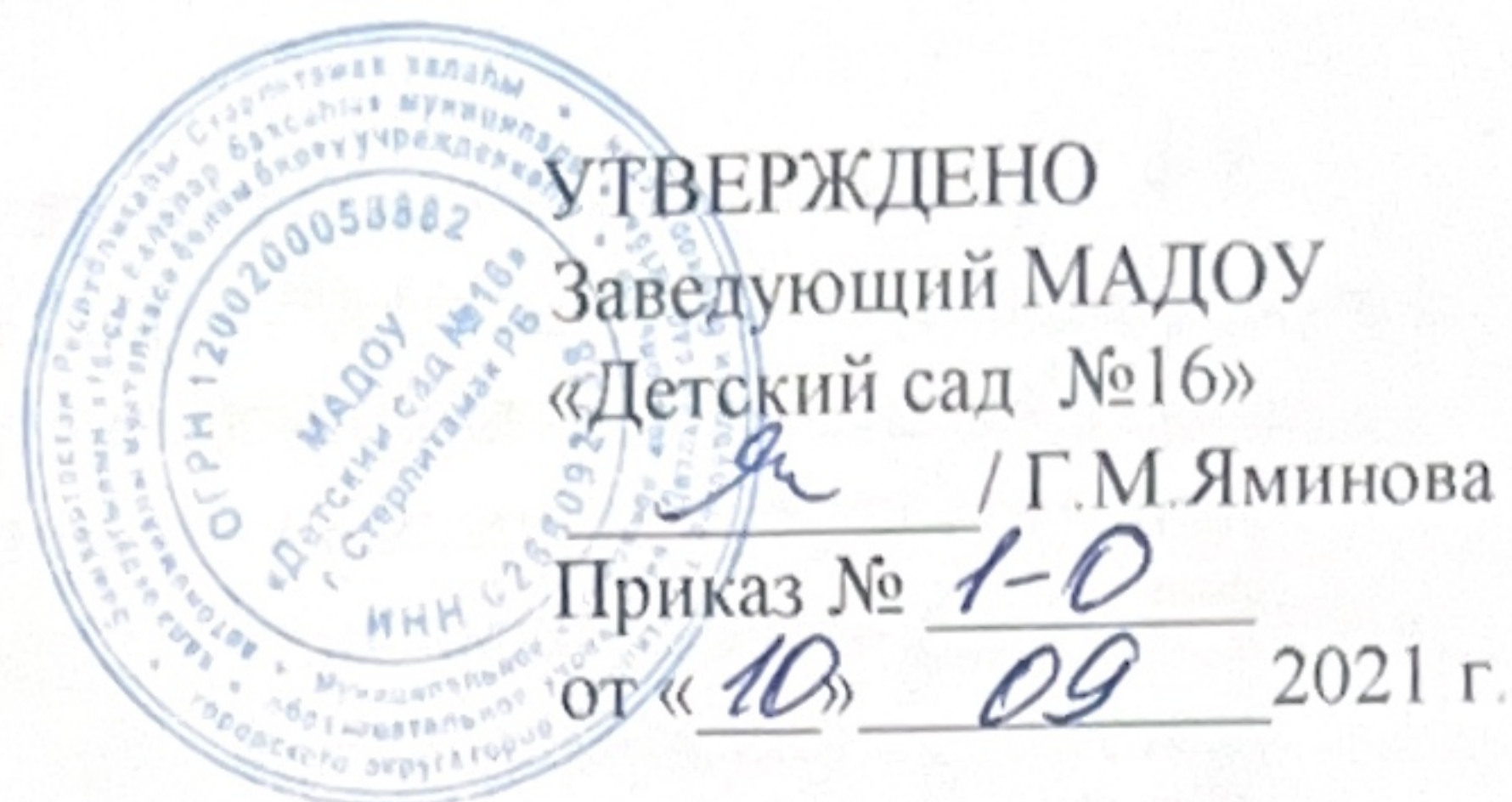

ИНСТРУКЦИЯ № 19 при работе с облучателем бактерицидным комбинированным ОБНП 2 «ГЕНЕРИС» в детских дошкольных учреждениях.

1. Общие положения

1.1. Облучатель бактерицидный переносной «ГЕНЕРИС» является облучателем комбинированного типа. Прибор может быть использован в помещениях лечебных учреждений, детских учреждений, предприятий пищевой промышленности, а так же в местах массового пребывания людей и является эффективным средством профилактики и борьбы с инфекциями, передающимися воздушным путем. При правильном использовании, срок службы прибора не менее 5 лет (при среднесуточной интенсивности эксплуатации 6 часов).

1.2. Облучатель должен эксплуатироваться в диапазоне температур от +10 до +55°C и относительной влажности воздуха не более 70 % при 25 °C. Окружающая среда не должна быть взрывоопасной, насыщенной токопроводящей пылью и химически активной.

2. Принцип работы

2.1 По принципу работы изделие является облучателем комбинированного типа. Обеззараживание воздуха производится за счет естественной конвекции воздуха в помещении. Открытая лампа может использоваться только в свободных от людей помещениях для быстрой дезинфекции воздуха. Экранизированная лампа, облучающая верхние слои воздуха, может использоваться в помещениях в присутствии людей.

2.2. Облучение осуществляется бактерицидными лампами, которые излучают УФ лучи с длиной волны 253,7 нм, губительные для различных бактерий, вирусов и микроорганизмов, находящихся на поверхностях и в воздухе помещений.

2.3. крепление облучателя производится к стене на высоте не ниже 2 м от уровня пола экранизированной лампой вверх.

3. Правила безопасности.

3.1. Облучатель должен подключаться к электрической сети с заземлением. Подключение производится квалифицированными специалистами. Заземляющий провод крепится к корпусу облучателя. Место крепления расположено внутри корпуса (под крышкой).

3.2. Во время работы облучателя присутствие людей в помещении не допускается. Обслуживающему персоналу следует пользоваться очками, не пропускающими УФ лучи, лицевыми масками и перчатками.

3.3. При длительной работе бактерицидных ламп может ощущаться характерный запах озона. В этом случае рекомендуется выключить облучатель и до прихода людей выдержать паузу в несколько минут.

- 3.4. При обслуживании (устранении неисправностей, замене ламп, стартеров, очистке ламп от пыли) облучатель должен быть отключен от сети.
- 3.5. Утилизация вышедших из строя ламп производится в соответствии с действующими нормами и правилами.
- 3.6. В случае боя ламп необходимо собрать капельку ртути резиновой грушей и место, где разбилась лампа, обработать 1% раствором марганцовокислого калия.
- 3.7. К эксплуатации бактерицидных установок должен допускаться персонал, прошедший необходимый инструктаж.
- 3.8. КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ СМОТРЕТЬ НА РАБОТАЮЩУЮ ЛАМПУ.
- 3.9. Лампы и корпус облучателя необходимо содержать в чистоте, так как даже тонкий слой пыли существенно задерживает поток излучения. По мере загрязнения ламп нужно протирать их отжатым тампоном, смоченным этиловым спиртом. Корпус протирать 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% раствора любого моющего средства с периодичностью 1 раз в месяц.